



Roztok na výplach rán na šetrné čistenie a zvlhčovanie chronických kožných rán.

octenilin® roztok na výplach rán

Naše plus:

- Vynikajúce čistiace vlastnosti
- Mimoriadne dobre znášaný pokožkou a tkanivami
- Pre všetky typy rán
- Vhodný na opakované a dlhodobé použitie
- Sterilný

Oblasti použitia:

- Na čistenie a zvlhčovanie chronických rán kože
- Na konzervujúce zvlhčenie obväzov a krytí rán
- Pri preväze na uvoľnenie prilepených obväzov alebo iných chrastou prilepených krytí rán
- Na odstránenie nečistôt z rán pozostávajúcich z nekrotického tkaniva, fibrotických povlakov, patogénnych zárodkov a biofilmu
- V kombinácii s podtlakovou terapiou (V.A.C.Ultra, KCI)

Profil produktu:

octenilin® roztok na výplach rán má vďaka nízkemu povrchovému napätiu veľmi dobrú zmáčavosť a schopnosť očistiť povrch tkaniva rany aj u ťažko prístupných povrchov, ako sú ragády, fisúry a záhyby rán.

Nejde o dráždivú látku; nemá senzibilizujúci vplyv; aplikácia je bezbolestná, prípravok nie je toxický na tkanivá a nebráni granulácii ani epitelizácii.

Dobrá znášanlivosť prípravku octenilin s tkanivami bola dokázaná dlhoročnými klinickými skúsenosťami a klinickým výskumom aj u chronických rán.

Návod na použitie:

Iba na vonkajšie použitie na kožné rany.

octenilin® roztok na výplach rán je vhodný k opakovanému a dlhodobému používaniu. Dlhodobé používanie prípravku octenilin® roztok na výplach rán by malo byť pod lekárskej dozorom. Súčasne s debridementom treba rany vždy najskôr opláchnuť a vyčistiť pomocou roztoku octenilin® roztok na výplach rán tak, aby boli ľahko rozpustné povlaky odstránené skôr, než bude rana ďalej ošetrovaná octenilin® gélom na rany (pozri samostatný návod na použitie).

Na čistenie možno používať obväzy alebo obklady napustené octenilin® roztokom na výplach rán. V prípadoch ťažko sa uvoľňujúcich obväzov sa odporúča obväzy rán navlhčiť alebo napustiť octenilin® roztokom na výplach rán, až kým je možné obväzy odstrániť jemne a bez traumatizácie povrchov rán. Aplikácia by sa mala vykonávať tak často, až kým sa dajú všetky povlaky a nekrózy ľahko odstrániť a rana je opticky čistá.

Pacienti s chronickými ranami sú často citliví na teplotu. octenilin® roztok na výplach rán je možné bezprostredne pred aplikáciou ohriať na telesnú teplotu.

octenilin® roztok na výplach rán

Zloženie:

Ingredients: Aqua valde purificata, Glycerol, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCl

Originalita a skladovanie:

Sterilný, v pôvodnom uzavretom obale. Používajte len bezchybné a nepoškodené balenie. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Skladujte od 15 °C do 25 °C. Po otvorení je nutné prípravok **octenilin® roztok** na výplach rán spotrebovať do 8 týždňov.

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

farba	bezfarebný
hustota	ca. 1,0 g/cm ³ / 20 °C
bod vzplanutia	nepoužiteľné
forma	tekutý
pH	ca. 5,4 / 20 °C / (neriedený)

Zvláštne upozornenia:

Kontraindikácie:

Pri známej alergii či pri podozrení na alergiu proti jednej či viacerým obsiahnutým látkam sa nesmie prípravok na rany **octenilin®** používať. V prípade pochybnosti konzultujte s lekárom. Na zamedzenie možnosti poškodenia tkaniva sa prípravok **octenilin®** nesmie aplikovať na hyalinnú chrupavku, do oka, do ucha, do nosa, na močový mechúr a do brušnej dutiny! Nepoužívajte ako infúziu či k injekčtáži! **Neužívať vnútorne. Aby sme sa vyhli eventuálnemu poškodeniu tkaniva, produkt nesmie byť do tkaniva aplikovaný pod tlakom alebo injekčne. Pri aplikácii do dutín je potrebné v rane vždy zabezpečiť vhodný odtok roztoku (napr. drenážou).**

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Len na vonkajšie použitie u kožných rán. Používajte len bezchybné a nepoškodené balenie. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. K zamedzeniu zavlečenia choroboplodných zárodkov je potrebné pri používaní prípravkov **octenilin®** dbať na to, aby obal neprišiel do styku s ranou! Zdravotnícku pomôcku uchovávajte mimo dosahu detí!

Logistické informácie:

Názov produktu	Balenie	Ks v kartóne
octenilin® roztok na výplach rán	350 ml	10

Súvisiace produkty:

- **octenilin® gél na rány**

Doba expirácie:

48 mesiacov

Typ prípravku:

zdravotnícka pomôcka tr. IIb (sterilný)

Životné prostredie:

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi, šetrne k životnému prostrediu, hospodárne a pri dodržaní vysokých štandardov kvality.



Schülke & Mayr vlastní povolenie na výrobu liečiv podľa GMP certifikátu.



Súčasť skupiny Air Liquide.

Ďalšie informácie:

Navštívte stránky:

www.schulke.sk

Výrobca:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pre individuálne dotazy a požiadavky:

Produktový manažér: tel.: +420 724 760 757
Area Sales manažér SR: tel.: +421 911 288 808
Manažér pre distribútorov SR: tel.: +421 903 262 932

Distribútor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distribútor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk